

**Verblüffende, sofort sichtbare
Ergebnisse:**



vorher



Nach der 1. Behandlung



vorher



Nach der 1. Behandlung

**«Wow, meine Haut sieht fantastisch aus
und das nach nur einer geneo-Behandlung!»**

**«Von diesem Frische-Effekt könnte man
beinahe süchtig werden!»**

Eine professionelle Beratung und Behandlung
erhalten Sie hier:

Exklusiver Vertrieb Schweiz:

swiss beauty point
Das Personalisierbare für Therapeutische Kosmetik

swiss beauty point | tobias gmbh
Grindelstrasse 12 | 8303 Bassersdorf
Tel. 044 803 22 11 | office@tobias.ch
www.swissbeautypoint.ch



geneo



BREATHE IN - SHINE OUT

- Intensive Hautverjüngung
- Schnelle, effektive Faltenglättung
- Lifting ohne chirurgischen Eingriff
- Sofortiger Glow-Effekt
- Porenverfeinerung

Pollogen
by geneo



Tiefen-Exfolierung

Durch das patentierte, einzigartige Verfahren von Capsugen™ (Kapsel und Vitamin-Cocktail) werden abgestorbene Hautzellen entfernt. Dadurch wird die Haut optimal für die Aufnahme der Wirkstoffe vorbereitet. Das Ergebnis: Ein strahlend, frisches Hautbild.



Sauerstoff-Aktivierung

Unzählige CO₂-Bläschen werden erzeugt. Dadurch wird die körpereigene Sauerstoffproduktion von innen her angekurbelt. Die Haut wird vitalisiert und erhält den Glow-Effekt.



Einbringung von Wirkstoffen

Essentielle Nährstoffe und Vitamine werden tief in die Haut eingeschleust. Das Ergebnis ist eine rundum versorgte und verjüngte Haut.


**geneo ist für alle Hauttypen und
für alle Gesichtspartien geeignet.**

Ergänzend dazu:



TriPollar® RF energy

Mittels Radiofrequenz ziehen sich die Kollagenfasern zusammen, was zu einer sofortigen Straffung der Haut führt. Zusätzlich wird die Kollagen- und Elastin-Produktion aufgebaut und langfristig angeregt. Mit dieser Technologie findet eine umfassende Rekонтurierung des Gesichtsovals auf nicht invasive Weise statt - anstelle eines chirurgischen Liftings.

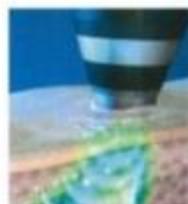

Ultraschall

Ultraschall erhöht die Durchlässigkeit der Haut. Dadurch können Wirkstoffe optimal eingeschleust werden. Durch die Aktivierung des Zellstoffwechsels werden diese umfassend von der Haut absorbiert.



geneo Behandlung - häufigste Fragen

Wieviele Behandlungen sind nötig?

Sie werden direkt nach der ersten Behandlung verblüffende Ergebnisse sehen! Für eine intensive Veränderung empfehlen wir eine Kur bestehend aus mehreren Behandlungen.

Wie fühlt sich die Behandlung an?

Die OxyGeneo™-Behandlung wirkt prickelnd und erfrischt die Haut. Die Radiofrequenz-Behandlung ist wie eine warme Massage. Alle geneo-Anwendungen sind angenehm und schmerzfrei.

Was kann ich nach der Behandlung erwarten?

Ihre Haut fühlt sich frisch, straff und verjüngt an. Sie ist anschliessend nicht gerötet wie bei ähnlichen Behandlungen und Sie können im Anschluss direkt wieder Ihren Tätigkeiten nachgehen.

Ist die Behandlung nachhaltig?

Diese Behandlung kurbelt die körpereigene Sauerstoff-, Kollagen- und Elastin-Produktion an. Deshalb profitieren Sie von einem Langzeiteffekt!



Kontraindikationen OxyGeneo®

Kunden in folgenden Zuständen dürfen nicht behandelt werden:

- Aktueller, früherer Hautkrebs oder prämaligne Muttermale.
- Schwangerschaft
- Alle Zustände im Behandlungsgebiet, wie Schmerzen, Ekzem, Juckreiz, empfindliche Haut, Schwellungen oder verletzte Haut, aktive Akne, Rosazea, Dermatitis, Psoriasis oder aktiver Herpes simplex (lokal aussparen).
- Vermeiden Sie die Behandlung von akuter Akne. Bei Kunden mit Neigung zu Akne kann diese kurzfristig etwas stärker auftreten.
- Intensives Sonnenbad (3-4 Tage vor der Behandlung)
- Isotretinoinpräparate (oder andere Akne Medikamente)
- Kurz nach Schälkuren mit Fruchtsäuren (3-4 Wochen warten)
- Gefäßprobleme wie: Teleangiektasie (lokal aussparen)
- Einige schwere Begleiterkrankungen wie: Nervenerkrankung, Herzprobleme und Krebs. Konsultieren Sie in solchen Fällen einen Arzt.
- Bekannte Allergien gegen Kosmetika und andere Produkte

Vorsichtsmassnahmen OxyGeneo®

Bitte widmen Sie folgenden Fällen besondere Aufmerksamkeit:

- Jegliche chirurgische, invasive, ablativEingriffe in die zu behandelnde Hautpartie, die innerhalb der letzten drei Monate vor der Behandlung stattgefunden haben oder noch nicht vollständig abgeheilt sind.
- Facelifting, Lidkorrektur, Hautverjüngung, chemisches Tiefenpeeling oder Tiefenabrasion, welche innerhalb der letzten drei Monate vor der Behandlung auf der zu behandelnden Hautpartie durchgeführt wurde oder noch nicht vollständig abgeheilt ist.
- Nach Filler-, Kollagen-, Fettinjektionen oder ein anderes in die behandelnde Fläche injiziertes Biomaterial darf erst nach zwei Wochen mit Oxygeneo+ behandelt werden, oder lokal aussparen.
- Eine Behandlung mit OxyGeneo+ darf frühestens 3 Wochen nach einer Botoxbehandlung starten, Areal wenn möglich aussparen.

Kontraindikationen TriPollar®

Kunden in folgenden Zuständen dürfen nicht behandelt werden:

- Schwangerschaft
- Personen mit einem Herzschrittmacher, Herzbeschwerden oder elektrisch implantierten Geräten.
- Metallimplantate unter oder in der Nähe der zu behandelnden Hautfläche.
- Krebserkrankung, insbesondere Hautkrebs oder Vorhandensein prämaligener Muttermale.
- Verlangsamter Stoffwechsel aufgrund von Immunerkrankungen wie AIDS oder HIV, oder Verwendung von immunsupprimierenden Arzneimitteln.
- schwere Erkrankungen wie z.B. Herzprobleme.
- Kunden mit Erkrankungen im zu behandelnden Hautareal welche durch Wärme ausgelöst werden, wie z.B. Herpes Simplex (Areal aussparen).
- Alle Zustände im Behandlungsgebiet wie Schmerzen, Psoriasis, Ekzemen
- Intensives Sonnenbad 2-3 Tage vor der Behandlung
- Jegliche chirurgische, invasive, exfolierende Eingriffe auf der zu behandelnden Fläche vor vollständiger Heilung.
- Unterspritzungen, wenn möglich aussparen

Vorsichtsmassnahmen TriPollar®

Bitte widmen Sie folgenden Fällen besondere Aufmerksamkeit:

- Kunden, welche Medikamente, pflanzliche Zubereitungen (Johanniskraut), Nahrungsergänzungsmittel oder Vitamine einnehmen, die Hautschädigungen verursachen können wie Isotretinoin (Roaccutan)
- **Kunden, welche allergisch auf Glycerin reagieren.**
- Kunden, welche infolge medizinischer Gründe eine beeinträchtigte Hautheilung aufweisen.
- Führen Sie die Behandlung nicht auf Liftingfäden (aus Gold oder Kunststoff), Fetttransplantaten oder Silikonimplantaten durch.
- **ACHTUNG:** Bei Unsicherheit über mögliche Nebenwirkungen sind die Kunden verpflichtet, ihren Arzt zu konsultieren und eine entsprechende Genehmigung für die Behandlung vorzuweisen.

Kontraindikationen Ultraschall

Kunden in folgenden Zuständen dürfen nicht behandelt werden:

- Schwangerschaft
- Personen mit einem Herzschrittmacher oder anderen elektrischen implantierten Geräten.
- Metallimplantate unter oder in der Nähe der zu behandelnden Hautfläche.
- Krebserkrankung, insbesondere Hautkrebs oder Vorhandensein prämaligener Muttermale.
- Verlangsamter Stoffwechsel aufgrund von Immunerkrankungen wie AIDS oder HIV, oder Verwendung von immunsupprimierender Arzneimitteln.
- schwere Erkrankungen wie z.B. Herzprobleme.
- Kunden mit Erkrankungen im zu behandelnden Hautareal welche durch Wärme ausgelöst werden, wie z.B. Herpes Simplex (Areal aussparen).
- Alle Zustände im Behandlungsgebiet wie Schmerzen, Psoriasis, Ekzemen
- Jegliche chirurgische, invasive, exfolierende Eingriffe auf der zu behandelnden Fläche vor vollständiger Heilung.

Vorsichtsmassnahmen Ultraschall

Bitte widmen Sie folgenden Fällen besondere Aufmerksamkeit:

- Kunden, welche Medikamente, pflanzliche Zubereitungen (Johanniskraut), Nahrungsergänzungsmittel oder Vitamine einnehmen, die Hautschädigungen verursachen können wie Isotretinoin (Roaccutan)
- Kunden, welche infolge medizinischer Gründe eine beeinträchtigte Hautheilung aufweisen.
- Führen Sie die Behandlung nicht auf Liftingfäden (aus Gold oder Kunststoff), Fetttransplantaten oder Silikonimplantaten durch.
- **ACHTUNG:** Bei Unsicherheit über mögliche Nebenwirkungen sind die Kunden verpflichtet, ihren Arzt zu konsultieren und eine entsprechende Genehmigung für die Behandlung vorzuweisen.